


BRAILLEX® Trio + iPhone

Immer eine Idee besser!

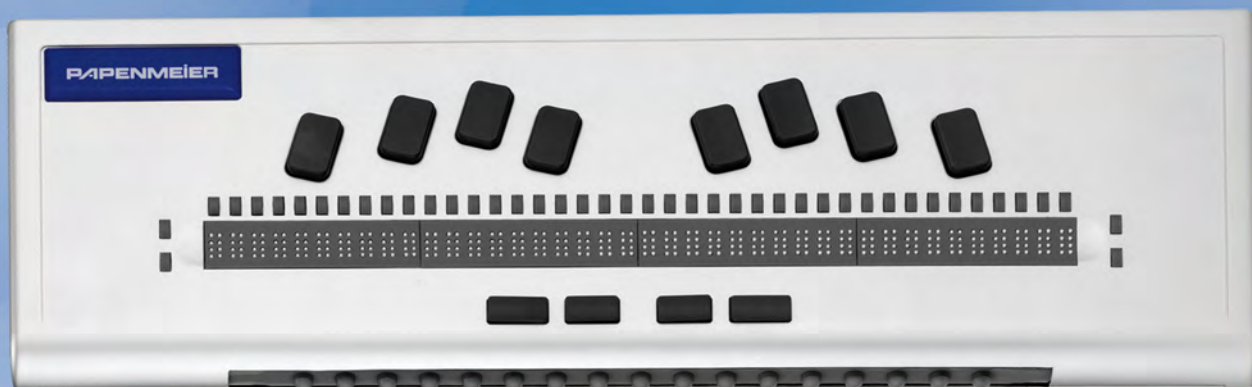

PAPENMEIER

BRAILLEX Trio und iPhone – immer eine Idee besser

Accessibility als Standard

Für technisch interessierte Blinde gibt es eine sprechende Revolution: Den Screenreader VoiceOver! Dieses Bildschirmleseprogramm ist als Standardfunktion im iPhone enthalten. Sie müssen VoiceOver nicht zusätzlich kaufen.

VoiceOver – für blinde iPhone Fans

Navigieren Sie Ihr iPhone einfach durch Doppeltippen, Bewegen oder Streichen mit dem Finger. Um Objekte anzusteuern, fahren Sie einfach mit dem Zeigefinger über den Bildschirm. Ihr iPhone ‚sagt‘ Ihnen, welcher Text dort steht, welchen Button Sie drücken können und so weiter. Sie erreichen Funktionen, die es auf anderen Geräten gar nicht gibt.

Das iPhone im praktischen Einsatz:

- **Anrufen mit VoiceOver**
Um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden, tippen Sie mit zwei Fingern zwei mal auf den Bildschirm. Die numerische Tastatur wird beim Anrufen eingeblendet. Aus der Liste Kontakte einen Kontakt doppelt antippen, in den Details die gewünschte Telefonnummer doppelt tippen und schon wählt Ihr iPhone.
- **Nachrichten versenden**
Unter diesem Menüpunkt werden SMS und MMS gelesen und geschrieben. Sie können einen Empfänger eingeben oder aus den Kontakten wählen.
- **Safari im Internet**
Komplexe Seiten öffnen sich auf dem iPhone problemlos und sehr schnell. Das Navigieren ist sehr zuverlässig und schnell.

BRAILLEX Trio und iPhone

- **Schnellere Texteingabe**
Mithilfe von VoiceOver können Sie Texte eingeben, komfortabler ist es allerdings mit BRAILLEX Trio. Nutzen Sie die Brailletastatur und schreiben Sie einfach und schnell.

• Privatsphäre beim Kommunizieren

Die Texteingabe bzw. die Textausgabe über die Braillezeile BRAILLEX Trio gewährleistet die Wahrung Ihrer Privatsphäre beim Kommunizieren. So können Sie Kurzmitteilungen oder E-Mails diskret lesen oder schreiben.

Einfachste Konfiguration:

So konfigurieren Sie BRAILLEX Trio für Ihr iPhone:

- An Ihrem BRAILLEX Trio aktivieren Sie einfach nur Bluetooth.

VoiceOver auf Ihrem iPhone konfigurieren:

- Öffnen Sie den Bereich ‚Einstellungen‘, wählen Sie ‚Allgemein‘, dann ‚Bedienungshilfen‘ und anschließend ‚VoiceOver‘ aus und aktivieren Sie den Schalter ‚VoiceOver‘.

Für das BRAILLEX Trio nehmen Sie an Ihrem iPhone folgende Einstellungen vor:

- Bluetooth aktivieren: Klicken Sie auf das ‚Einstellungen‘-Symbol auf dem Home-Bildschirm. Wählen Sie Einstellungen ‚Allgemein‘, dann klicken Sie auf die Schaltfläche Bluetooth und aktivieren diese.
- Bluetooth wird automatisch gestartet und sucht entsprechende Geräte (Erstmalig kann diese Verbindung bis zu einer Minute dauern).
- Danach tippen Sie auf das gefundene Bluetooth-Gerät BRAILLEX Trio und geben den Code 0000 (die Standardkennung BRAILLEX Trio) ein, um Ihr BRAILLEX Trio mit dem iPhone zu verbinden.
- Das war's auch schon! Wenn Sie diese Gerätekombination neu starten, wird BRAILLEX Trio automatisch aktiviert.

Wir beraten Sie gerne ausführlich. Rufen Sie uns am besten gleich an oder senden Sie uns eine E-Mail.

Technische Voraussetzung

An folgende Apple-Geräte können Sie Ihr BRAILLEX Trio anschließen und sofort verwenden:

Per Bluetooth:

- iPhone 3GS / 4 / 4S ab iOS 4
- iPad 1 / 2 ab iOS 4
- iPod Touch der vierten Generation ab iOS 4

Per Bluetooth oder USB:

- MAC-PCs ab Betriebssystem „Mac OS X 10.6 (Snow Leopard)“

Wir sind Mitglied im



PAPENMEIER

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG · Fachbereich RehaTechnik · Talweg 2 · 58239 Schwerte
Tel.: 02304 946-0 · Fax: 02304 946-246 · E-mail: info.reha@papenmeier.de · www.papenmeier.de
Hotline: 02304 946-118



Technische Änderungen vorbehalten.
Sämtliche Logos und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Besitzers.
WW 10.11 R3755,455