

VICTOR READER

Stratus 4M

Kurzübersicht - Tastenfunktionen und Einstieg



VICTOR READER

Stratus 4M

Inbetriebnahme:

1. Vor der ersten Inbetriebnahme schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an. Dazu stecken Sie das Ende des mitgelieferten Netzteils in den Netzanschluss, der sich auf der Rückseite rechts befindet. Während des Ladevorgangs blinkt die Einschalttaste.

Bitte beachten: Der Victor Reader kann während des Ladevorgangs benutzt werden.

2. Schalten Sie den Victor Reader ein indem Sie die Taste „**Ein/Ausschalten**“ gedrückt halten. Sie hören einen Piepton und einen Begrüßungstext.

3. Schieben Sie die beiliegende CD vorne in den Schlitz des Laufwerks. Die CD enthält die aufgesprochene Bedienungsanleitung im Daisy-Format. Sie wird Ihnen automatisch vorgelesen.

Lieferumfang:

- Daisyplayer mit CD-Laufwerk, Anschluss für USB und Flash-Karte, Text-zu-Sprache-Funktion
- Ladegerät
- Hörbuch auf CD mit Bedienungsanleitung
- Tastaturabdeckung



Bücherregaltaste



Lesezeichen




CD-Auswurf




CD-Laufwerk

daisy

Humanware™

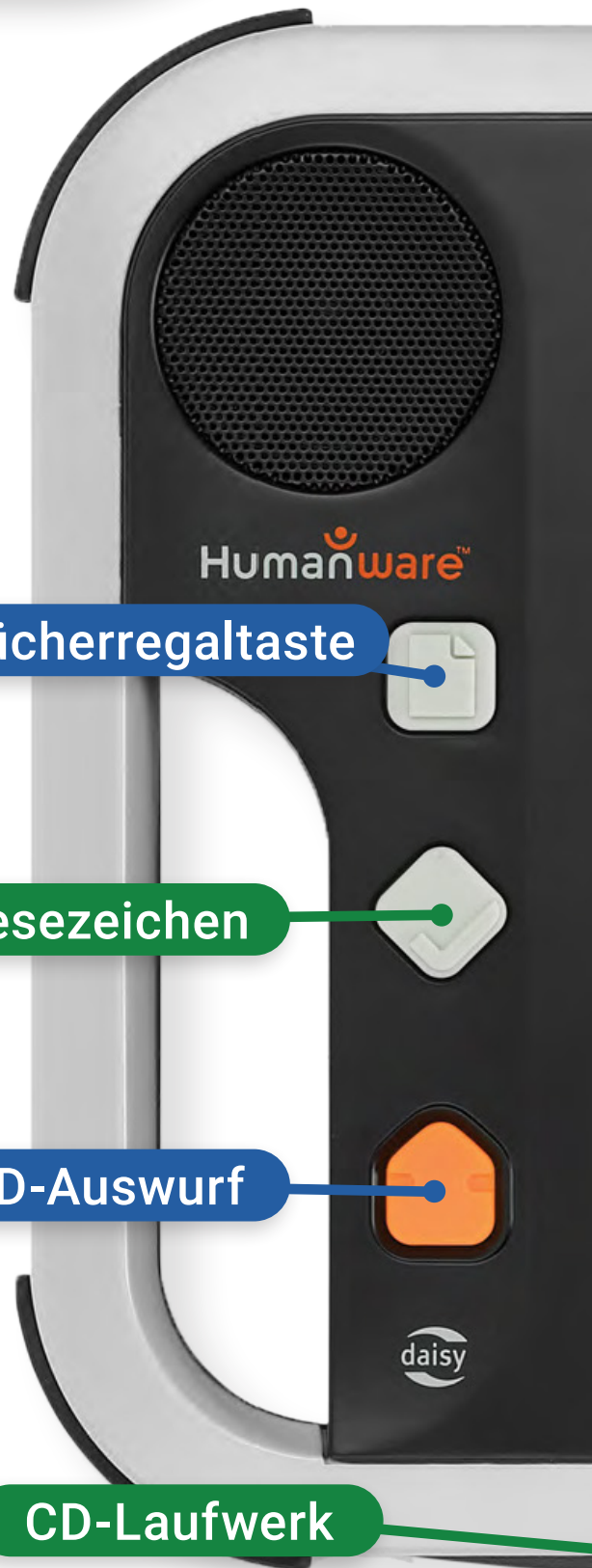

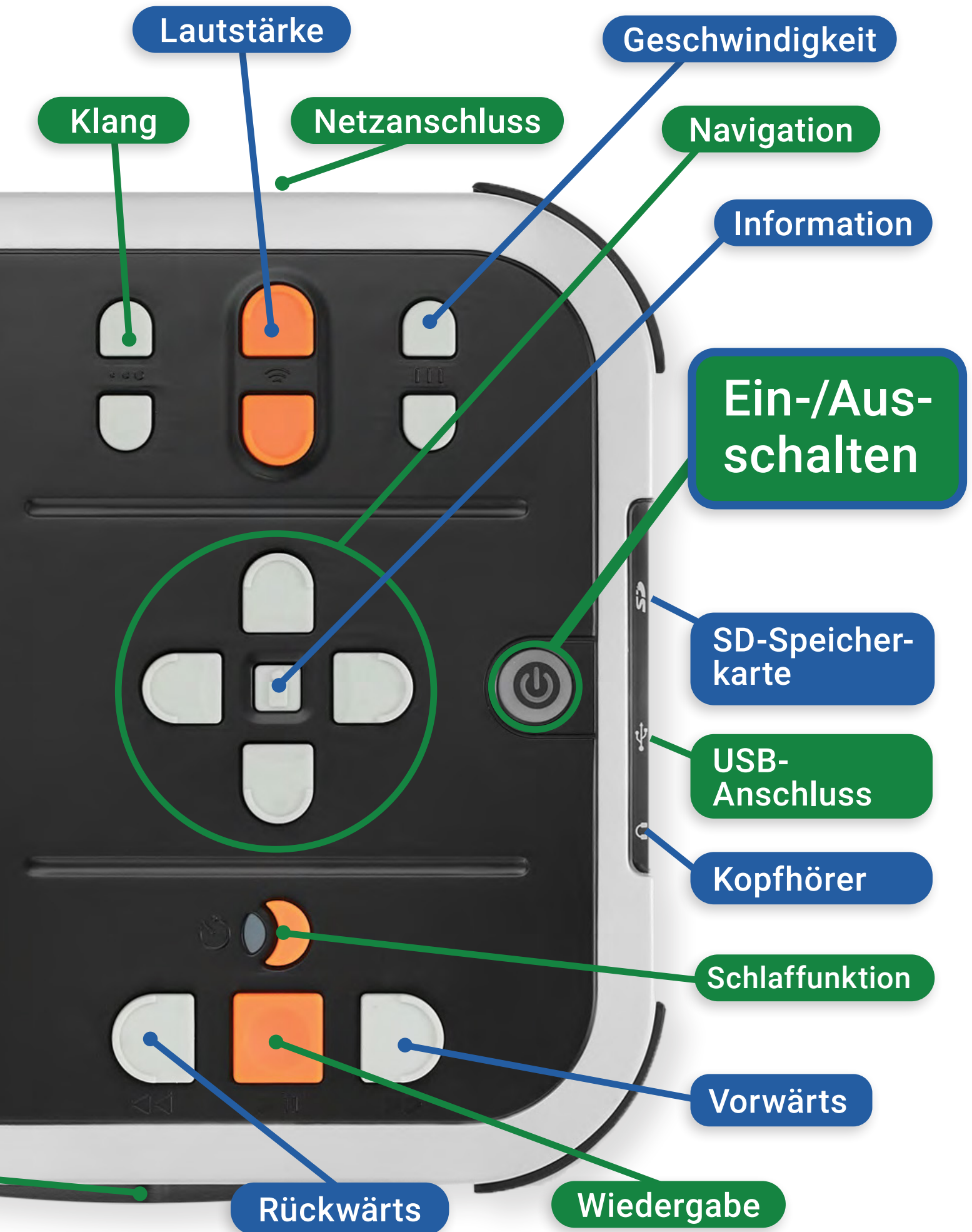

Hinweise:



1. Akku:

Einen passenden Ersatzakku können Sie über unseren Service beziehen.

2. Reset:

Durch ca. 10 Sekunden langes Drücken der Taste „Ein/Ausschalten“ setzen Sie das Gerät in den ursprünglichen Zustand zurück.

3. Automatisches laden von Inhalten:

Das Gerät lädt ca. alle drei bis vier Minuten neue Daten von der CD. Die hierdurch entstehenden Geräusche beeinträchtigen nicht die Funktion.

4. CD wird nicht ausgeworfen:

- Drücken und halten Sie die Taste „CD-Auswurf“.
- Starten Sie nach ca. 10 Sekunden das Gerät neu bei weiterhin gedrückter Taste „CD-Auswurf“.
- Eventuell handelt es sich um eine zu sehr beanspruchte CD Ihrer Hörbücherei.

Tastaturhilfe:

Die Tastaturhilfe ist automatisch eingeschaltet, wenn keine CD eingelegt ist. Drücken Sie eine Taste und der Victor Reader sagt Ihnen die zugehörige Funktion an.

Funktionen:

• Lesezeichen-Liste:

Durch **einmaliges** Drücken der Taste „Lesezeichen“ gelangen Sie in die Lesezeichenliste. Mit den Pfeiltasten links/rechts springen Sie zu entsprechenden Lesezeichen.

• Lesezeichen löschen:

Durch **zweimaliges** Drücken der Taste „Lesezeichen“ werden alle Lesezeichen gelöscht.



Hinweis:

Die zugehörige Tastaturabdeckung zur einfacheren Bedienung befindet sich bei Lieferung direkt auf dem Gerät. Möchten Sie das komplette Tastenfeld nutzen, können Sie die Maske einfach vom Gerät entfernen.